



БЫСТРЫЕ И УДОБНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ СЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ КРОВИ В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Набор для претрансфузионного определения группы и ABO-совместимости крови донора и больного **ЭРИТРОТЕСТ™-ЭкспрессКонтроль**

Основным компонентом набора является карточка с лунками, на поверхности которых содержатся высушенные моноклональные антитела серии ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон (Анти-А, Анти-В и Анти-D Супер) для тестирования эритроцитов донора и реципиента. Предусмотрена также лунка для прямого определения совместимости эритроцитов донора и сыворотки реципиента по системе ABO. Набор позволяет проводить подтверждающее определение групповой принадлежности крови по системам ABO и Резус, а также ABO-совместимости. В комплект входят палочки для смешивания и пипетки.



Набор для определения совместимости крови донора и реципиента и выявления аллоиммунных антител **ЭРИТРОТЕСТ™-ИммуноКонтроль**

Набор предназначен для быстрого выявления в сыворотке реципиента неполных (IgG) антител против эритроцитов донора, подобранных для трансфузии. Набор позволяет выявлять иммунные антитела к групповым антигенам эритроцитов систем: Резус (D, C, E, c, e), Kell, Duffy, MNS и др. Чувствительность набора значительно превосходит чувствительность полиглюкинового и желатинового тестов, а в отношении антител к системе Резус аналогичен по чувствительности «золотому стандарту» - непрямому тесту Кумбса. Для работы с набором не требуется сложного лабораторного оборудования.



Набор для экспресс-определения групп крови **ЭРИТРОТЕСТ™-ГРУППОКАРТ**

Главным компонентом набора является карточка с 5 лунками, на поверхность которых нанесены сухие моноклональные антитела серии ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон: Анти-А, Анти-В, Анти-AB и Анти-D Супер, а также контрольный реагент. Набор позволяет проводить экспресс-определение групповой принадлежности крови по системам ABO и Резус.

Основными достоинствами набора ЭРИТРОТЕСТ™-ГРУППОКАРТ являются:

- Возможность быстрого (3-4 мин) определения групп крови ABO и Резус;
- Возможность тестирования в полевых условиях;
- Полная документированность тестирования;
- В комплект входят палочки для смешивания и пипетка.



Одновременное применение наборов ЭРИТРОТЕСТ™-ЭкспрессКонтроль и ЭРИТРОТЕСТ™-ИммуноКонтроль будет способствовать увеличению степени иммунологической безопасности гемотрансфузий у больных.



БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ГЕМАТОЛОГ»

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ, НАБОРЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУПП КРОВИ В ЛЕЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ

ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлоны для определения ABO-принадлежности крови

Предназначены для типирования групп крови по системе ABO. Антитела надежно выявляют слабые формы **A** и **B** антигенов. Широко используются на станциях и в отделениях переливания крови при определении групп крови у доноров, в лечебных учреждениях при определении групп крови у больных, в родильных домах для определения групп крови у новорожденных и при рутинном ABO-типировании населения.

Специфичность ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлонов в отношении вариантов антигена A
(в реакции прямой агглютинации на плоскости)

ЭРИТРОТЕСТ™- Цоликлоны	Варианты антигена A				
	A ₁	A ₂	A ₃	A _x	A _{el}
Анти-A (серии R и F)					
Анти-A1					
Анти-Aсл					
Анти-H		*	**		



Примечание: — сильная агглютинация (++++); — варибельная агглютинация (++/++++); — слабая агглютинация (+/+); — негативное реагирование; *для группы A₂O; **для группы A₂B; — нет данных.

ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлоны для определения Резус-принадлежности и фенотипирования

Предназначены для типирования крови по всем клинически значимым антигенам системы резус (**D, C, C^w, c, E, e**, а также системы **Kell (K, k)**).

Обладают **высокой** авидностью, **высоким** титром и **не** дают **перекрестных** реакций.



Реагенты не содержат антител других специфичностей.

Комбинированное использование ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлонов Анти-D Супер и Анти-D IgG гарантирует надежное выявление многих слабых форм антигена D. Специальные добавки обеспечивают стерильность реагентов, их стабильность и высокую активность.

Компания «ГЕМАТОЛОГ» также выпускает:

- ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлоны для определения групповой принадлежности крови по другим системам: **Kidd, MNS, Lewis, P1, Duffy**;
- Контрольные растворы для отдельных ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлонов;
- Дополнительные реагенты и наборы для серологических исследований;
- Наборы и комплекты ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлонов;
- Изделия из пластика для серологических исследований;
- Иммунопрепараты и наборы для судебно-медицинской экспертизы.

Форма выпуска: стеклянные/пластиковые флаконы-капельницы по 5 и 10 мл.

Имеются регистрационные удостоверения.

Предприятие сертифицировано по стандартам управления качеством ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и ГОСТ ISO 13485-2011 (ISO 13485:2003).

Более подробную информацию о продукции Вы можете получить на нашем сайте www.gematolog.com, по тел.: (499) 159-30-79, 159-33-96 моб. тел. (495) 504-90-98; Бесплатная линия для регионов РФ: 8-800-777-07-72, e-mail: hematologltd@yandex.ru

